

Scarban® omvat een reeks van hoogwaardige producten voor de behandeling van littekens.

#### Indicaties:

- Scarban® is geïndiceerd voor de behandeling van nieuwe en bestaande keloïde en hypertrofische littekens.

#### Omschrijving Scarban® producten:

- Zelfklevend siliconenverbanden voor littekenbehandeling op maat, leverbaar in een Light versie en in een Elastic versie.
- De Scarban® siliconenverbanden bestaan uit een 100% medische siliconengel, een rekbaar laag en een beschermende laag.
- Medische siliconenkledij en specifieke siliconenverbanden op maat voor brandwonden, (plastische) chirurgie en dermatologie. De siliconenkledij bestaat uit 100% medische siliconengel en een rekbaar polyamidestof.
- Scarban® Silicone Cleaning Soap, een reinigingsmiddel voor de Scarban® siliconenverbanden.
- Scarban® Skin Lotion, een comfortverhogende emulsie voor de huid, met verzorgende eigenschappen.

#### Werking:

Scarban® siliconenverbanden versoepelen het litteken. Ook de roodheid van het litteken zal door deze verbanden verbeteren. Bovendien is Scarban® een ideaal verband om directe wrijving op de huid te voorkomen. Scarban® siliconenverband is niet steriel, klevend, wasbaar en is geschikt voor meervoudig gebruik. Niet op open wonden gebruiken.

#### Gebruiksaanwijzing Scarban® siliconenverband:

- Knip het Scarban® siliconenverband in de gewenste vorm en grootte. Knip daarbij ronde vormen en geen hoeken (fig. 1). Het beste resultaat krijgt u als het litteken volledig bedekt, met een overlapping van ongeveer twee cm van de gezonde huid.
- Maak het litteken en de huid er om heen goed schoon, vetvrij en droog (fig. 2).
- Trek de beschermfolie van het Scarban® siliconenverband (fig. 3).
- Plak de zelfklevende zijde van het Scarban® siliconenverband op het litteken (fig. 4). Bouw het gebruik langzaam op zoals voorgesteld in het schema.
- U kunt het Scarban® siliconenverband aanvullend vastplakken met een hechttape of rekverband (fig. 5).
- Bij het verwijderen van het Scarban® siliconenverband van de huid let u erop om het siliconenverband niet steeds op dezelfde plaats te verwijderen.
- Na het verwijderen van het Scarban® siliconenverband kunt u het bedekte oppervlak van de huid inwrijven met een hydraterende crème zoals de Scarban® Skin Lotion.

#### Hoe gebruikt u Scarban® siliconenverband het best?

- Gebruik bij aanvang van de therapie het Scarban® siliconenverband gedurende 3 uur per dag. Bij een normaal en gunstig verloop (d.w.z. geen huidirritatie) dient u de draagperiode met één uur per dag te verlengen tot u het Scarban® siliconenverband maximaal 20 uur per dag draagt. Deze opbouwfase dient om uw huid te laten wennen aan het effect van het siliconenverband.
- Scarban® siliconenverband dient voor optimaal resultaat minimaal 8 tot maximaal 20 uur per dag gedragen te worden.

#### Gebruiksaanwijzing voor de Scarban® siliconenhandschoen:

- De Scarban® siliconenhandschoen wordt gedragen indien littekenvorming bestaat op de hand of op de vingers. De werking van de siliconenhandschoen versoepelt de huid en bevordert de beweeglijkheid van de gewrichten.
- Om de handschoen aan te trekken dient u de boord van de handschoen om te vouwen.
- Breng een dosis Scarban® Skin Lotion aan op de hand en in de handschoen en trek deze aan. De Scarban® Skin Lotion bevordert eveneens de duurzaamheid van de siliconenlaag.
- In ieder geval nooit de handschoen aantrekken zonder een glijmiddel.
- Draai na het aantrekken de boord van de handschoen terug.

#### Onderhoud van het Scarban® siliconenverband:

- Wrijf het siliconenverband in met enkele druppels van de Scarban® Silicone Cleaning Soap (fig. 6). De kleefkracht verdwijnt na contact met de Cleaning Soap of water. Wrijf alle vuil er zo goed mogelijk af.
- Spoel daarna overvloedig onder warm, stromend water (fig. 7).
- In contact met water rolt het siliconenverband op (fig. 8).
- Om te drogen, leg het (opgerolde) siliconenverband op een droge theedoek met de klevende zijde naar boven.
- Na volledig uitdrogen ontrolt het siliconenverband zich vanzelf en komt de kleefkracht terug.
- Gebruik het siliconenverband enkel als het volledig droog is.

#### Gebruiksduur:

Bij een gebruik volgens de voorschriften gaat het Scarban® siliconenverband Light 2 tot 4 weken mee en het Scarban® siliconenverband Elastic 4 tot 8 weken.

#### Waarschuwingen:



- Gebruik Scarban® siliconenverband NOOIT op open wonden!
- De Scarban® Skin Lotion en de Scarban® Silicone Cleaning Soap zijn speciaal ontwikkeld om het comfort van de behandeling verder te verhogen. Gebruik NOOIT andere zalven, crèmes, gels of lotions in combinatie met het Scarban® siliconenverband, tenzij dit expliciet door uw arts is voorgeschreven.
- Raadpleeg steeds uw arts bij huidirritatie of huidproblemen.
- De Scarban® producten zijn enkel voor uitwendig gebruik.
- De Scarban® producten worden met hoge kwaliteitseisen geproduceerd. Indien het Scarban® siliconenverband toch siliconen zou verliezen door slijtage aan de randen, kunt u de randjes zelf bijknippen. Kleef daarvoor het siliconenverband op een plasticfolie en knip de randjes bij.
- Droog het Scarban® siliconenverband nooit in de zon of in de nabijheid van een warmtebron.
- De Scarban® producten zijn volledig veilig voor de behandeling van littekens bij kinderen. Bewaar niettemin de Scarban® producten buiten het bereik van kinderen.

#### Deze verpakking bevat:

1 of 2 stuks Scarban® siliconenverband en 50 ml Scarban® Silicone Cleaning Soap (zie verpakking).

# Scarban®

## Hoe gebruikt u Scarban® siliconenverband het best?

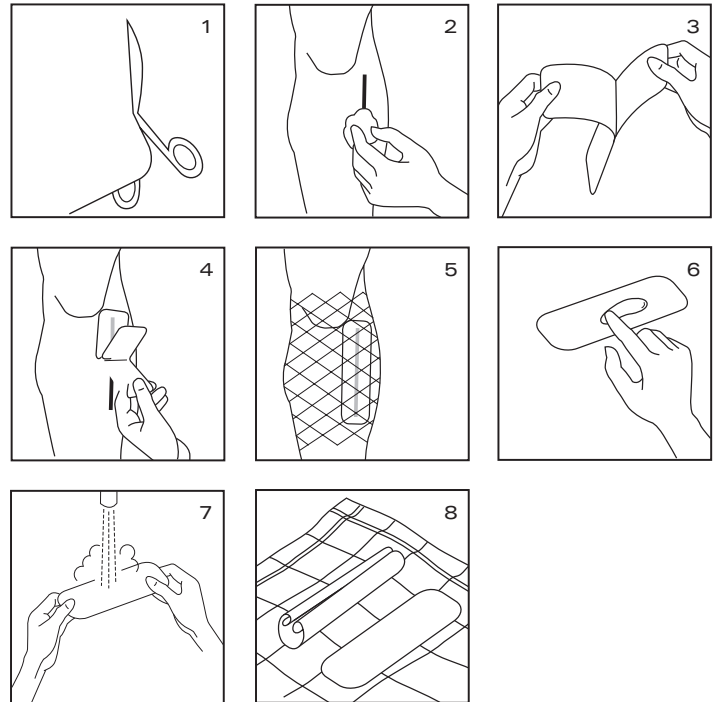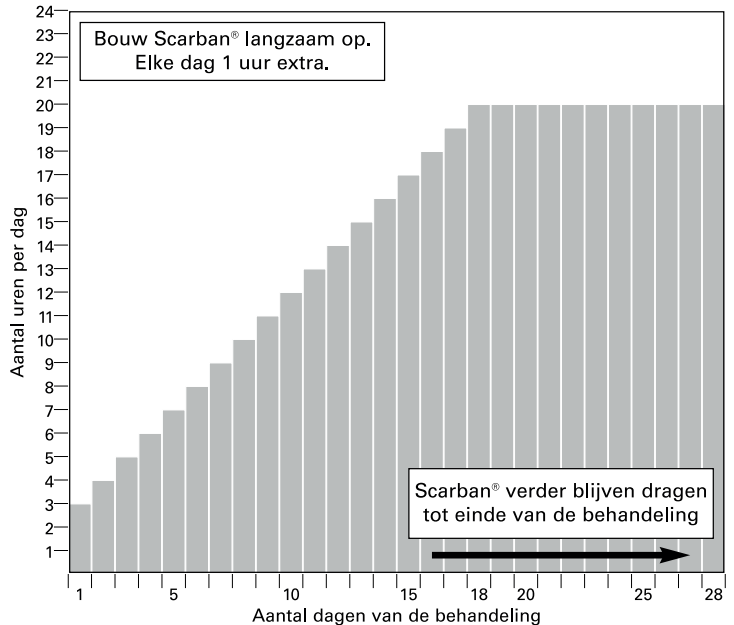



**BAPMEDICAL**  
MEDICAL CARE FOR THE SKIN

**EXCLUSIVE DISTRIBUTION**

Phone : +31 (0)55 355 25 80  
Fax : +31 (0)55 355 91 98  
info@bap-medical.com  
[WWW.BAP-MEDICAL.COM](http://WWW.BAP-MEDICAL.COM)

5°C  25°C

Patent pending.



**Made by/Manufactured by:**  
ScarPro NV  
Kortrijkstraat 52  
B-9800 Deinze  
[www.scarban.eu](http://www.scarban.eu)