

Scarban®

Professionele littekenbehandeling

Gebruiksaanwijzing

Praktische tips

Scarban® is effectief bij zowel oude als nieuwe littekens (hypertrofie/keloid).

Voor het beste resultaat is het belangrijk om de Scarban® siliconenverbanden elke dag, voor ten minste 12 opeenvolgende uren, op het litteken te dragen.

Littekenherstel kost tijd. Het voorkomen of behandelen van littekens met Scarban® duurt minimaal 3-6 maanden.

Gebruik Scarban® alleen na volledige wondsluiting en nadat hechtingen en korstjes zijn verdwenen.

Gebruik Scarban® zolang het litteken verheven is, rood is of klachten geeft.

In zeldzame gevallen kan de huid overgevoelig reageren (huidirritatie) op een siliconenbehandeling. Stop de therapie totdat de huid weer rustig is. Start opnieuw met de behandeling en laat de huid langzamer aan het verband wennen (elke dag één uur langer).


Bij correct gebruik en onderhoud biedt elke Scarban® verpakking zes tot acht weken litteken-therapie.

Het is te adviseren om een goede hydraterende litteken crème (bijvoorbeeld ALHYDRAN medische crème) te gebruiken als Scarban® niet gedragen wordt.

Bij zwemmen of intensief sporten dient het Scarban® siliconenverband tijdelijk te worden verwijderd. Breng het verband opnieuw aan na de activiteit.

Bescherm het litteken tot één jaar na wondsluiting tegen schadelijke UV-straling. Blootstelling aan de zon kan versnelde zonverbranding en permanente verkleuring van het litteken veroorzaken. Scarban® siliconenverbanden bieden standaard zeer hoge UV-bescherming.

Omdat élk litteken zorg nodig heeft!
scarban.nl | scarban.be

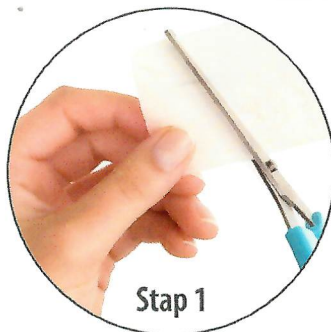

Stap 1

Indien nodig kan het Scarban® siliconenverband in de juiste maat geknipt worden. Zorg ervoor dat 2 cm rondom het litteken bedekt is met siliconen.



Stap 2

Voor een goede kleefkracht en duurzaamheid van Scarban® siliconenverband is het raadzaam om de haren rondom de littekenlocatie te verwijderen. Reinig en droog de huid vóór het aanbrengen van het verband goed.



Stap 3

Verwijder de beschermfolie van het Scarban® siliconenverband.



Stap 4

Breng de klevende zijde van het Scarban® siliconenverband aan op het litteken (niet op een open wond).



Stap 5

Fixeren: Eventueel kan het Scarban® siliconenverband nog gefixeerd worden met een hecht- of rekverband (is normaliter niet nodig).




Stap 6

Reinigen: Voor een goede hygiëne en om de kleefkracht te behouden dient het Scarban® siliconenverband dagelijks gereinigd te worden (bijvoorbeeld tijdens het douchen). Wrijf het verband in met enkele druppels Scarban® Silicone Cleaning Soap of een neutrale zeep.



Stap 7

Afspoelen: Spoel het Scarban® siliconenverband goed af onder lauw stromend water zodat al het vuil en zeepresten verwijderd zijn.

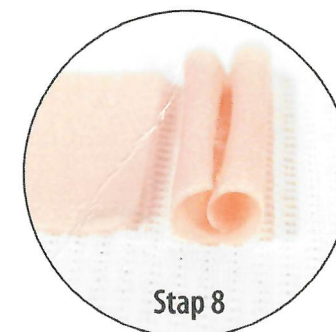

Stap 8

Drogen: Laat het Scarban® siliconenverband drogen (kleefzijde naar boven) op een droge, pluivsrijke en schone ondergrond. Tijdens het drogen rolt het verband zich vanzelf weer uit en komt de kleefkracht geleidelijk terug. Hierna kan Scarban® opnieuw aangebracht worden.

Gebruiksaanwijzing hand- en vingerlijn



Vingertape

Superelastische siliconentape (30 x 2,5 cm) om een vinger rondom (circulair) te behandelen. Altijd aan het uiteinde van de vinger starten en richting het lichaam (hart) toewerken. Zorg voor een gelijkmatige drukverdeling. Druk zorgt ook voor een aanvullende littekenbehandeling.



Webpace



Speciaal gevormd dik en elastisch siliconenverband voor gebruik tussen duim- en wijsvinger (webpace).
Afmeting: 10,5 x 4 cm.



Vinger*

Stap 1: Wrijf de vinger die behandeling behoeft, in met een crème (bijvoorbeeld ALHYDRAN medische crème), zodat deze makkelijk in de siliconenvinger (dus niet de drukkous) glijdt.



Stap 2: Trek de Scarban® drukkous voorzichtig met heen-en-weergaande bewegingen over de siliconenvinger heen. De drukkous zorgt voor een aanvullende littekenbehandeling.



Stap 3: Bij het uittrekken van de Scarban® Vinger, haal je eerst de drukkous van de aangedane vinger (van onder naar boven). Vervolgens wordt de siliconenvinger voorzichtig verwijderd.



Hand**

Stap 1: Wrijf de hand (vooral de vingers) die behandeling behoeft, in met een crème (bijvoorbeeld ALHYDRAN medische crème). Hierdoor glijdt de hand makkelijk in de Scarban® siliconenhandschoen.



Stap 2: Sla de boord van de Scarban® siliconenhandschoen naar buiten om. Bij het aantrekken van de handschoen worden de vingergedeelten voorzichtig met heen-en-weergaande bewegingen over de vingers getrokken.



Stap 3: Als de handschoen volledig aan is, wordt de boord weer teruggeslagen. Bij het uittrekken van de Scarban® Handschoen wordt de boord naar buiten omgevouwen. Trek voorzichtig aan de vinger-toppen en verwijder rustig de handschoen.

Vinger* - Indien gewenst is de Scarban® Vinger op lengte te knippen (maak dan gebruik van de streepmarkering op het product).
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing in de verpakking voor het reinigen van de Scarban® Vinger.

Hand** - De Scarban® Handschoen kan gebruikt worden om een volledige hand te behandelen, bijvoorbeeld na brandwonden.
- Gebruik de Scarban® Handschoen gedurende de nacht, of dag- en nacht (minimaal twaalf uur).
- Zorg dat de handschoen volledig intact is (knip niet in de handschoen).
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing in de verpakking voor het reinigen van de Scarban® Handschoen.

BAP Medical B.V.
Laan van de Maagd 119,
7324 BT Apeldoorn
Tel. +31 (0)55 355 25 80
Fax +31 (0)55 355 91 98
www.bap-medical.com
info@bap-medical.com